

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Producto: MANGUERAS 1/4" CON CONEXIONES CGA (PARA ALTA PRESIÓN) Marca: JGE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN:

Las mangueras para alta presión, fabricadas acero inoxidable trenzado flexible Yy tubin interno, para conexión a cilindros de suministro de gas medicinal.

USOS:

- Las mangueras, se utiliza como extensión para suministrar en cualquier manifold oxígeno compatible para gas medicinal por medio de acople tipo CGA-540

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Manguera tubo interno 1/4" acero inox y coraza en acero inoxidable con guayas de seguridad encauchetada para en caso de rotura no afecte la integridad de la persona que la esté manipulando.
- 1/4 " de alta presión ss manguera trenzada manguera de oxígeno químico.
- Temperatura -70 a 260 ° C
- Espesor 0.76mm --- 1.5mm.
- Certificado ISO 9001: 2008, CE - NFPA99

MATERIALES:

❖ Mangueras	acero inoxidable calidad 304
❖ Accesorios conectores	en acero inoxidable y Bronce Laton [Cu58%, Zn 39%, otros 3%] con recubrimiento en cromo
❖ O'rings	biton
❖ Guaya	Acero carbono encauchetado

ESPECIFICACIONES

❖ Dimensiones	Desde 1/8" a 1"
❖ Tipo de Gas Medicinal	Oxígeno
❖ Conexión de Entrada	1/4" NPT - CGA-540-320-590-326-580-350-500.
❖ Conexión de Salida	1/4" NPT - CGA-540
❖ Presión de trabajo	Máx 3000 PSI Con temperatura de habitacion
❖ Presión de rotura	Máx 12000PSI
❖ Longitud	Según requerimiento del cliente.

VIDA UTIL:

- La manguera 1/4" en manifold de alto intercambio de cilindros, las gaseras recomiendan cambiarla cada tres(3) años.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES:

- No instale la manguera si encuentra rastros de aceite, grasa, derivados de petróleo o daños en los accesorios.
- Al momento de instalar la manguera, asegurese de que las conexiones esten correctamente.
- En el momento de colocar las mangueras a las válvulas no se debe exceder la fuerza de torsión a más de 1/4 de vuelta, sostener la palanca para que el látigo no se tuerza. enganchar la guaya a la válvula para cuando abra el sistema hágalo lentamente, ubíquese de medio lado en caso de rotura para que no afecte su integridad.
- Evitar no colapsar la manguera para no tener restricción del flujo.



GARANTÍA

JGE EQUIPOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS LTDA. GARANTIZA AL CLIENTE EL PRODUCTO DURANTE SEIS MESES POR DEFECTOS DE MATERIAL O DE FABRICACIÓN, A PARTIR DE LA FECHA DE LA VENTA. LA GARANTÍA PIERDE VALIDEZ CUANDO SE REALICEN ALTERACIONES AL PRODUCTO EN SUS PARTES EXTERNAS O INTERNAS O CUANDO NO SE SIGAN LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS DE MANIPULACIÓN.

NIT: 900,031,064-9

Cra, 24 N° 35-26 Sur - PBX: 3615706 - Tels: 3002164892

www.jgeequiposmedicos.com - - jgelta@hotmail.com - Bogotá; D.C - Colombia