

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

Producto: TOMAS JGE TUBO DE COBRE TP3-08

Marca: JGE

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**DEFINICIÓN:**

La toma para gas medicinal es una terminal de distribución de gases medicinales con acoplamiento rápido de cierre automático que no permite el paso del mismo cuando se retira el acople.

Cuenta con tomas JGE tipo AGA (fabricación nacional) y tomas Chemetron para pared, aéreas y ciélticas con salida DISS

**USOS:**

- Para uso en habitaciones, salas de cirugía, UCI, Hemodinamia, Consultorios, salas de parto, recuperación entre otras áreas.

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Las tomas JGE TP3-08 poseen un sistema con doble cheque de retención, que impiden el paso del gas cuando no está conectado ningún acople, esto permite realizar mantenimiento sin suspender el suministro de gas en toda el área.
- El sistema de acoplamiento de los accesorios es rápido; cada accesorio es personalizado para su correspondiente gas medicinal y por diseño no son compatibles entre gases.

**MATERIALES:**

❖ Cuerpo, Buje, Racores, Vástagos, postas, y arandela	Bronce Laton [Cu58%, Zn 39%, otros 3%] con recubrimiento en cromo
❖ Base estampada en bronce	Bronce [Cu 62%, Zn 35%, otros 3%]
❖ Resortes y tornillos	Acero Inoxidable 304
❖ O'rings	Caucho Nitrilo 100%
❖ Escudo	ABS Cromado
❖ Tubo de cobre tipo K	3/8" externo y 1/4" de caudal de flujo.
❖ Stickers	Caucho Nitrilo 100%
❖ Base	Lámina cold roll calibre 18 zincada

**ESPECIFICACIONES**

❖ Dimensiones	153 X 103 mm.
❖ Tipo de Gas Medicinal	Oxígeno, Aire, Vacío, Oxido nitroso, Gas carbónico, Nitrógeno.
❖ Conexión de Entrada del Gas	DISS 1/2", 3/4"
❖ Conexión de Salida	Acoples
❖ Accesorios	Acoples, Racores, Mangueras, Flujómetros
❖ Presión de Entrada	110PSI
❖ Presión máxima de trabajo	100PSI
❖ Peso	690g

**LISTA DE PARTES:**

1 BASE JGE OXIGENO 3/8" TUBO COBRE TP3-08	9 O'RING REF 2-106	17 TORNILLO ACERO INOXIDABLE CABEZA AVELLANADA 5/32" X 3/4"
2 O'RING REF 2-017	10 O'RING REF 2-013	18 RESORTE ACERO INOX EXTERNO 1" TOMA JGE
3 TORNILLO ACERO INOXIDABLE CABEZA GARBANZO 5/32" X 3/8"	11 RACOR JGE 14 mm TP3-08	19 ARANDELA JGE 1.1/4" X 1" UNO Y DOS CHEQUES
4 BASE JGE SENCILLA TP3-08 ZINCADA	12 RESORTE ACERO INOX PRIMARIO TP DOS CHEQUES	20 PIN ACERO INOX JGE 3 X 22 mm UNO Y DOS CHEQUES
5 POSTAS JGE 5/32" TP3-08	13 VASTAGO JGE 7/16" X 5/16" TP3-08	21 ESCUDO JGE TP3-08
6 TORNILLO ACERO INOXIDABLE CABEZA GARBANZO 5/32" X 3/8"	14 O'RING REF 2-108	22 TORNILLO ACERO INOXIDABLE CABEZA AVELLANADA 5/32" X 3/4"
7 RESORTE ACERO INOXIDABLE CONICO 7/16" X 9/16" TP3-08	15 CUERPO JGE OXIGENO TP3-08	23 STICKER OXIGENO ESCUDO TP3-08
8 VASTAGO JGE 7/16" X 3/16" TP3-08	16 O'RING REF 2-110	24 BUJE JGE 1.3/4" TP3-08
		25 STICKER OXIGENO REDONDO TP3-08
		26 PIN ACERO INOX JGE 26 mm UNO Y DOS CHEQUES

**CUIDADOS Y PRECAUCIONES:**

- No instale el regulador si encuentra rastros de aceite, grasa, derivados de petróleo o daños en la entrada de la válvula del cilindro.
- Al momento de instalar el regulador al cilindro, asegurese de que las conexiones estén correctamente.
- Antes de abrir la válvula del cilindro, gire la mariposa en sentido contrario de las manecillas del reloj para que el regulador no tenga presión en el manómetro de LPM para evitar posibles daños.
- Por seguridad no se ubique de frente al regulador al momento de abrir la válvula de cilindro hagase por el costado o por la parte de trasera.
- Se recomienda realizar mantenimiento como mínimo cada 6 meses para verificar desgaste de rosca y verificación de manómetros.

**GARANTÍA**

JGE EQUIPOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS LTDA. GARANTIZA AL CLIENTE EL PRODUCTO DURANTE UN AÑO (1) POR DEFECTOS DE MATERIAL O DE FABRICACIÓN, A PARTIR DE LA FECHA DE LA VENTA. LA GARANTÍA PIERDE VALIDEZ CUANDO SE REALICEN ALTERACIONES AL PRODUCTO EN SUS PARTES EXTERNAS O INTERNAS O CUANDO NO SE SIGAN LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS DE MANIPULACIÓN.

NIT: 900,031,064-9

Cra, 24 Nº 35-26 Sur - PBX: 3615706 - Tels: 3002164892

www.jgeequiposmedicos.com - jgeltada@hotmail.com - Bogotá, D.C - Colombia

**PRODUCTO:**



**DESPIECE PARTES:**

